

# WESORB - Poliglikolsav (PGA)

---

**Author :** Fordító

## Leírás

---

A WESORB® varrófonalak szintetikus, felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek poliglikolsavból készülnek. A varrófonalak fonott szerkezete bevonattal rendelkezik, amely kalcium-sztearát és poli(kaprolakton) keverékéből áll. A WESORB® varrófonalak a szervezetbe beültetve felszívódnak, és nem okoznak szöveti irritációt. A WESORB® varrófonalak nem antigének, nem pirogének, és csak enyhe szöveti reakciót váltanak ki a felszívódás során.

## Javallatok

---

A WESORB® varrófonalak általánosan használhatók lágyszöveti zárásra vagy ligálásra, de nem használhatók szív- és idegszöveti, valamint szemészeti műtéteknél.

## Hatás

---

A WESORB® varrófonalak minimális gyulladást váltanak ki, és elősegítik a fibrotikus kötőszövetek kialakulását. A WESORB® varrófonalak felszívódása hidrolízis útján történik, fokozatosan csökkentve a szakítószilárdságot, majd a tömegvesztést. Beültetési vizsgálatok szerint a WESORB® varrófonalak eredeti szakítószilárdságuk körülbelül 70%-át megtartják két hét után, és több mint 40%-át három hét után. A teljes felszívódás 60-90 nap között történik.

## Ellenjavallatok

---

Mivel a WESORB® varrófonalak felszívódóak, nem alkalmazhatók olyan helyeken, ahol hosszabb szöveti zárás szükséges.

## Figyelmeztetések

---

A felhasználóknak ismerniük kell a felszívódó varrófonalak használatával kapcsolatos sebészeti eljárásokat. A steril terméket csak sterile körülmények között nyissuk ki, és ne használjuk, ha a csomagolás sérült.

## Tárolási feltételek

---

A WESORB® terméket száraz, tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni. Ne használja a lejáratí idón túl!