


Kompakt

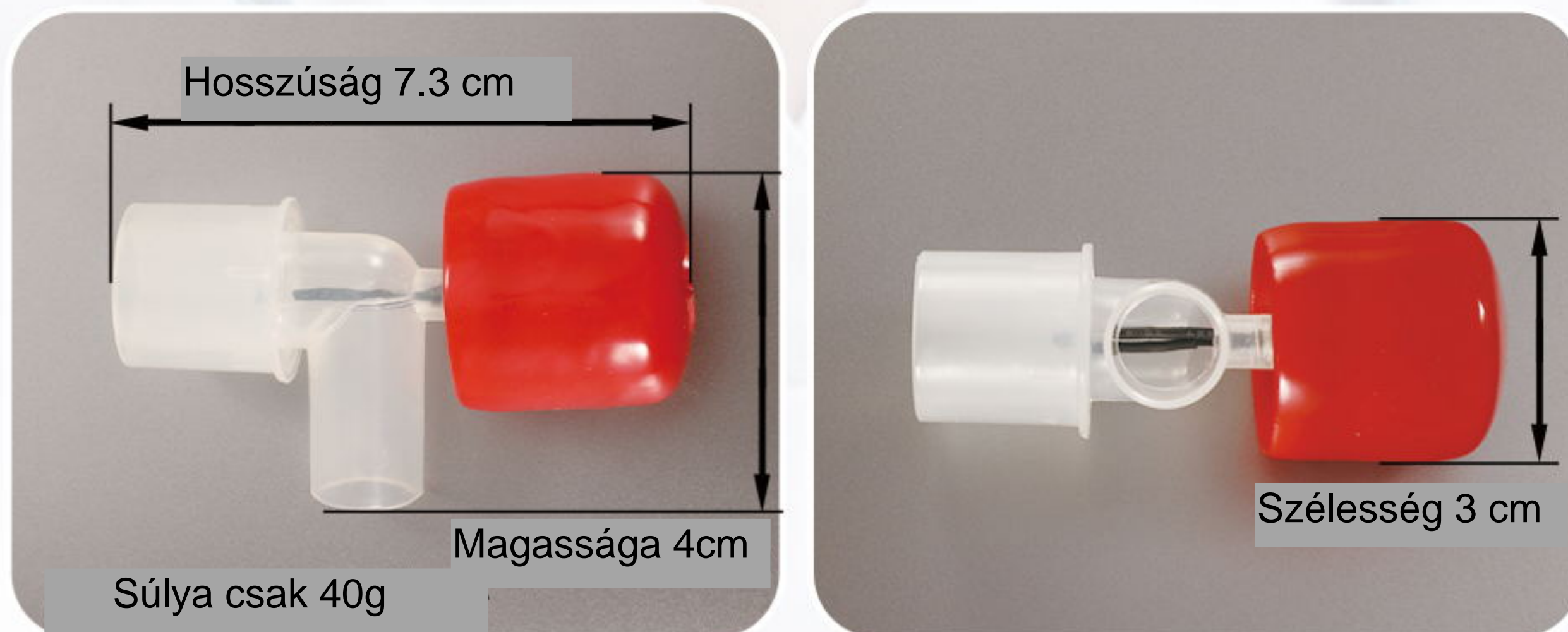

Könnyen használható

Csak csatlakoztassa az Apnea Monitor-t az endotracheális tubus és az altatógép közé, és már kész is!

Apnea érzékelése

Ha az állat 30 másodpercnél hosszabb ideig nem lélegzik, az Apnea Monitor hangjelzést ad ki.

Autómatikus bekapcsolás

Csak csatlakoztassa az állathoz. Az állat első lélegzétvétele automatikusan bekapcsolja az Apnea Monitort!

Autómatikus kikapcsolás

Amikor az állat lecsatlakozik, a Apnea Monitor 25 másodpercig várakozik, majd 20 másodpercig hangjelzést ad ki, mielőtt kikapcsolna.

Beépített akkumulátor

A Pet Apnea Monitor egy hosszú élettartamú lítium akkumulátorral működik, ami akár 2 évig is szolgáltatást nyújt. Nincs szükség elemcserére vagy karbantartásra.

Könnyű tisztítás

Használjon egy szövetet, amit megnedvesített 70%-os izopropil alkohollal, majd törölje át vele. Majd használjon egy tiszta szövetet, hogy megszáradítsa, használat előtt. Ne merítse folyadékba, és ne sterilizálja autoklávval.

Tartsa zárt térben

Használaton kívül, tartsa a Pet Apnea Monitor-t műanyag csomagolásban vagy fiókban, hogy elkerülje érzékeny funkciójának aktiválását.

Egy éves garancia



(A Pet Apnea Monitor-t arra használják, hogy egy 2 hónapos, körülbelül 425 gramm súlyú macskát figyeljenek az altatás alatt bekövetkező apnea esetén.)

Megjegyzés: Majdnem az összes állatorvosi altatószernél adagfüggetlenül az altatószerek lassítják vagy gátolják a légzést. Ez teszi a légzésmonitorozást az altatás mélységének értékelésének ideális eszközévé. Az altatás alatt bekövetkező legtöbb vészhelyzetet az emberi hibákra lehet visszavezetni, egyszerűen a figyelmetlenség hiánya miatt. A Pet Apnea Monitor mindig éber, nemcsak az elhalálozások megelőzésére, hanem minden altatás jobb kezelésére is lehetőséget ad.