

ALCAMIDE - Polyamid (PA)

Author : Fordító

Leírás

Az ALCAMIDE® varrófonalak szintetikus, nem felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek kopoliamid polimerből állnak, FD&C Blue 2 pigmenttel festve. A színezőanyag mennyisége nem haladja meg az 1%-ot. Az ALCAMIDE® varrófonalak megfelelnek az Európai Gyógyszerkönyv (EP) és az Amerikai Gyógyszerkönyv (USP) követelményeinek.

Javallatok

Az ALCAMIDE® varrófonalak általánosan alkalmazhatók légyszöveti zárásra vagy ligálásra, de nem használhatók szív- és idegszöveti, valamint szemészeti műtéteknél.

Hatás

Az ALCAMIDE® varrófonal minimális akut gyulladásos reakciót vált ki a szövetekben, amelyet fokozatosan kötőszöveti kapszulázódás követ. Bár a polyamid nem szívódik fel, a varrófonal fokozatos hidrolízise miatt idővel elveszítheti szakítószilárdságát.

Ellenjavallatok

A polyamid varrófonal nem alkalmazható olyan esetekben, ahol a hosszú távú szöveti feszülés megőrzése szükséges.

Figyelmeztetések

A varrófonalat csak azok a sebészek használhatják, akik ismerik a nem felszívódó varrófonalak használatát. A steril terméket csak sterile körülmények között nyissuk ki, a sérült vagy nyitott csomagolást ne használjuk fel.

Tárolási feltételek

Az ALCAMIDE® terméket száraz és tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni.