

Használati útmutató – ZX-...S Ultrahangos Tisztítókhöz

1. Biztonsági előírások

- A készüléket csak megfelelő földelt aljzatba csatlakoztassa.
- Ne érintse meg a készüléket vizes kézzel működés közben.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne üzemeltesse a tisztítót, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Gyermekektől tartsa távol a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.

2. Termékleírás

A ZX-031S egy professzionális ultrahangos tisztító, amely nagy frekvenciájú ultrahanghullámok segítségével távolítja el a szennyeződések különböző tárgyokról, például ékszerekről, szemüvegekről, orvosi eszközökről és egyéb finom szerkezetű tárgyokról.

3. Műszaki adatok

- **Tápfeszültség:** AC 220-240V, 50/60Hz
- **Teljesítmény:** 120W
- **Frekvencia:** 40 kHz
- **Tartály kapacitása:** 3L
- **Hőmérséklet tartomány:** 20–80°C
- **Időzítési tartomány:** 1–30 perc

4. Használati utasítás

1. Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.
2. Töltse meg a tartályt megfelelő mennyiségű tisztítófolyadékkal.
3. Helyezze a tisztítandó tárgyakat a tartályba.
4. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és tisztítási időt a kezelőpanelen.
5. Kapcsolja be az ultrahangos tisztítást.
6. A tisztítás befejezése után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
7. Öntse ki a használt folyadékot a leeresztő szelepen keresztül, majd tisztítsa meg a tartályt.

5. Karbantartás és tisztítás

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A tartályt rendszeresen tisztítsa meg puha kendővel és enyhe tisztítószerrel.
- Ne használjon maró hatású vegyszereket vagy dörzsölő anyagokat.

- Rendszeresen ellenőrizze a kábeleket és csatlakozókat sérülések szempontjából.

6. Karbantartási táblázat

Karbantartási feladat	Gyakoriság	Megjegyzés
Tartály tisztítása	Hetente	Puha kendővel, enyhe tisztítószerrel
Kábelek ellenőrzése	Havonta	Sérülések és kopások ellenőrzése
Ultrahangos egység vizsgálata	Félévente	Szerviz szakember által

7. Hibaelhárítás

- **A készülék nem kapcsol be:** Ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozót.
- **Gyenge tisztítóhatás:** Ellenőrizze a folyadék szintjét és cserélje ki, ha szükséges.
- **A fűtés nem működik:** Győződjön meg róla, hogy megfelelő hőmérsékletet állított be.

8. Figyelmeztetések

- Ne üzemeltesse a készüléket üres tartállyal.
- Ne használjon gyúlékony folyadékot tisztításra.
- Tartsa be a hulladékkezelési előírásokat a készülék eldobásakor.
- A földelő vezetéket megfelelően csatlakoztassa.

9. Modellek közötti különbségek

Modell	Frekvencia (kHz)	Kapacitás (L)	Fűtési teljesítmény (W)	Ultrahang teljesítmény (W)
020S	40	2	100	120
031S	40	3.2	200	180
060S	40	6.5	300	240
100S	40	10	500	600

10. Karbantartási kártya

- **Gyári szám:**
- **Gyártási dátum:**
- **Üzemi feszültség:**
- **Névleges teljesítmény:**

11. Garancia és szerviz

A termékre 12 hónap garancia vonatkozik, amely a gyártási hibákra érvényes. Amennyiben probléma merül fel, forduljon a hivatalos szervizhez.

12. Termékrajz

