

ALCADINONE - Polidioxanon (PDO)

Author : Fordító

Leírás

Az ALCADINONE® varrófonalak szintetikus, felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek polidioxanonból készülnek. Ezek a varrófonalak felszívódnak a szervezetben, és nem okoznak jelentős szöveti irritációt.

Javallatok

Az ALCADINONE® varrófonalak általánosan alkalmazhatók légyszöveti zárásra, ahol a szövetek növekedése akár 6 hétig is tart. Nem használhatók felnőtt kardiovaszkuláris szövetekben, mikrosebészeti és idegszöveti műtéteknél.

Hatás

Az ALCADINONE® varrófonal minimális akut gyulladáshoz vezet, amelyet a fibrotikus kötőszöveti beágyazódás követ. Az ALCADINONE® varrófonal felszívódása a hidrolízis révén történik, fokozatosan veszít szakítószilárdságából. A teljes felszívódás 180-210 nap között történik.

Ellenjavallatok

Az ALCADINONE® varrófonal nem alkalmazható olyan esetekben, ahol hosszú távú szöveti zárás szükséges, illetve ahol protézisek beültetésére van szükség.

Figyelmeztetések

A varrófonalat csak steril körülmények között nyissuk ki, a sérült vagy nyitott csomagolást ne használjuk fel. A varrófonal nem alkalmas idős, alultáplált vagy legyengült betegek esetében, illetve olyan betegeknél, akiknél a sebgyógyulás késhet.

Tárolási feltételek

Az ALCADINONE® terméket száraz, tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni.