

TooToo Meditech Co., Ltd.

TooLas

Állatorvosi Lézerterápiás Készülék

Kezelés besorolása	Állapot	Mozgási sebesség	Kúra	Kezelőfej	Egyszeri idő
Ízületi gyulladás — Degeneratív ízületi gyulladás, térdkalács-ficam, porckorongsérv, stb.	Akut felszíni	M.S.3~4cm/s	1d/T; 6T	Kontakt kezelőfej	8 perc
	Akut mély	I.S.1~2cm/s	1d/T; 6T		
	Krónikus felszíni	M.S.3~4cm/s	2d/T; 6T		
	Krónikus mély	I.S.1~2cm/s	2d/T; 6T		
Trauma/sérülés — Harapás, forrázás, égés, posztoperatív sebek, stb.	Akut felszíni	H.S.>4cm/s	1d/T; 3T	Érintésmentes kezelőfej	5 perc
	Akut mély	M.S.3~4cm/s	1d/T; 6T		
	Krónikus felszíni	H.S.>4cm/s	2d/T; 3T		
	Krónikus mély	I.S.1~2cm/s	2d/T; 6T		
Bőrgyógyászat/allergiák — Pyoderma, paraziták, neurodermatitis, hyperkeratinizáció, stb.	Akut felszíni	H.S.>4cm/s	1d/T; 6T	Érintésmentes kezelőfej	5 perc
	Akut mély	M.S. 3~4cm/s	1d/T; 6T		
	Krónikus felszíni	H.S.>4cm/s	2d/T; 6T		
	Krónikus mély	I.S.1~2cm/s	2d/T; 6T		
Izomszöveti betegségek — Íngyulladás, izomsorvadás, izom-/szalagfeszülés, stb.	Akut felszíni	M.S.3~4cm/s	1d/T; 3T	Kontakt kezelőfej	10 perc

Kezelés besorolása	Állapot	Mozgási sebesség	Kúra	Kezelőfej	Egyszeri idő
	Akut mély	I.S.1~2cm/s	1d/T; 6T		
	Krónikus felszíni	M.S.3~4cm/s	2d/T; 3T		
	Krónikus mély	I.S.1~2cm/s	2d/T; 6T		
Fájdalomcsillapítás — Csont- /izomfájdalom, neuropátiás fájdalom, bélgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás, stb.	Akut felszíni	H.S.>4cm/s	1d/T; 3T	Kontakt kezelőfej	8 perc
	Akut mély	I.S.1~2cm/s	1d/T; 3T		
	Krónikus felszíni	H.S.>4cm/s	2d/T; 3T		
	Krónikus mély	I.S.1~2cm/s	2d/T; 6T		
Fül-, orr-, torok-/szájüregi betegségek — Szájgyulladás, középfülgyulladás, orrnálykahártya-gyulladás, légszõ összeomlás, felsõ légúti fertõzések, stb.	Akut felszíni	H.S. > 4cm/s	1d/T; 3T	Fül-orr- gégészeti/szájüregi kezelõfej	6 perc
	Akut mély	I.S.1~2cm/s	1d/T; 3T		
	Krónikus felszíni	H.S. > 4cm/s	1d/T; 3T		
	Krónikus mély	I.S.1~2cm/s	2d/T; 6T		

Tippek

- Használat közben védõszemüveget kell viselni.
- Az állatorvosoknak a kezelési dózist és a kezelési tervet a háziállat klinikai diagnózisa és állapota alapján kell idõben módosítaniuk a legjobb kezelési hatás elérése érdekében.
- Ne irányítsuk a lézert közvetlenül a szembe.
- Vérzõ sebekre tilos a közvetlen lézersugárzás.
- Tilos a közvetlen lézersugárzás azon a helyen, ahová gyógyszert injektáltak.

Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína **Tel:** +86-755-28306385 **E-mail:** info@newtootoo.com **Web:** www.newtootoo.com