

ALCALENE - Polipropilén (PP)

Author : Fordító

Leírás

Az ALCALENE® varrófonalak szintetikus, nem felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyeket izotaktikus kristályos polipropilén polimerből készítenek. A varrófonal kék színű, hogy jobban látható legyen.

Javallatok

Az ALCALENE® varrófonalak általánosan használhatók légyszöveti zárásra vagy ligálásra, de nem használhatók szív- és idegszöveti, valamint szemészeti műtéteknél.

Hatás

Az ALCALENE® varrófonalak minimális akut gyulladásos reakciót váltanak ki, amelyet a varrófonal fokozatos beágyazódása követ. Mivel nem felszívódó varrófonal, a szövetekben marad, és tartós sebzáró támogatást nyújt.

Ellenjavallatok

Az ALCALENE® varrófonalak nem alkalmazhatók szív- és idegszöveti műtéteknél.

Figyelmeztetések

A varrófonal használata előtt a sebészeknek ismerniük kell a nem felszívódó varrófonalak használatával kapcsolatos műtéti eljárásokat. A steril terméket csak sterile körülmények között nyissuk ki, a sérült vagy nyitott csomagolást ne használjuk fel.

Tárolási feltételek

Az ALCALENE® terméket száraz, tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni.